

# Dentapreg™ PINPost | PINPost

English

Česky

1) Clean the root canal. Ensure dry working area (rubberdam).

1) Vyčistěte kořenový kanálek. Zajistěte suché pracovní pole (rubberdam).




2) Apply the self-adhesive dual curing cement to the root canal.\*

2) Aplikujte samoadhezivní duálně tuhnoucí cement do kořenového kanálku.\*





3) Remove the PINPost from storage bottle and apply a thin layer of cement onto it.

3) Vyjměte PINPost ze zásobní lahvičky a nacementujte ho.

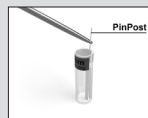



4) Place PINPost to root canal. Repeat the steps 3 and 4 as necessary (4-6 PINPosts).

4) Umístěte PINPost do kořenového kanálku. Kroky 3 a 4 opakujte dle potřeby (4-6 PINPostů).

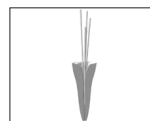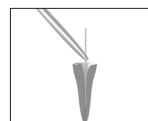



5) Clean the overflowing cement in flaring area and light cure it.\*

5) Odstraňte přebytek cementu v oblasti flaringu a cement vytvrdte.\*

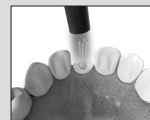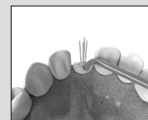


6) Build the core usual way and then cut PINPosts to required length.

6) Vybudujte korunku klasickým způsobem. Následně zkraťte PINPost na požadovanou délku.

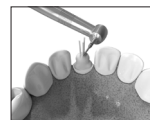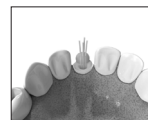

7) Final solution of crown after the PINPost application.

7) Finální korunka po aplikaci PINPostu.

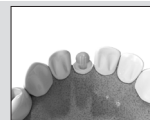

\* Follow the manufacturer instructions.  
Postupujte dle doporučení výrobce.